

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### 1 A gyógyászati segédeszköz neve

**GenTeal™** síkosító szemcsepp.



Ez a tájékoztató a termék alkalmazásával kapcsolatos fontos tudnivalókat, valamint biztonsági információkat tartalmaz. Kérjük, olvassa el figyelmesen és őrizze meg, mivel a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet! A termék nem megfelelő alkalmazása súlyos szemészeti problémákat eredményezhet.

### 2 Rendeltetés szerinti alkalmazás

A GenTeal szemcsepp egy síkosító és nedvesítő szemészeti oldat környezeti irritáció vagy szemészeti műtét következtében fellépő szárazságra, illetve a szem fáradtsága vagy kellemetlenség érzése esetén. A GenTeal szemcsepp bármely típusú kontaktlencsével alkalmazható.

### 3 Leírás

A GenTeal szemcsepp 0,3% hipromellózt tartalmazó steril, enyhén hipotóniás, vizes szemcsepp.

A GenTeal szemcsepp GenAqua™ tartósítórendszerrel tartalmaz [nátrium-perborát és foszfonsav (Dequest 2060S)], amelyből kis mennyiségű hidrogén-peroxid szabadul fel, hatékony germicid (csíraölő) szerként. A szem felszínével való érintkezéskor a hidrogénperoxid egy percen belül vízre és oxigénre bomlik.

**STERILE A**

Aszeptikus eljárással készült.

### 4 Alkalmazási utasítások

A készítmény alkalmazása előtt mosson kezet! Mindkét szem kötőhártyaszákjába cseppentsen egy vagy két cseppet (ügyeljen rá, hogy a cseppentő csúcsa ne érjen a szem felszínéhez), és pislogjon többször!

### 5 Ellenjavallatok

Ne használja ezt a terméket, ha allergiás (túlérzékeny) annak bármelyik összetevőjére!

### 6 Az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések


Az első alkalmazás előtt ellenőrizze, hogy a cseppentőtartály védőzárát ép-e! Ha a védőzár sérült, vagy a cseppentőtartályt már felbontották, ne használja a készítményt!

A cseppentőtartály felbontását követő 12 hét múltán dobja el az esetleg még megmaradt készítményt!

Ne használja a készítményt a lejáratí időn túl! 

Ha többféle gyógyszert kell helyileg alkalmaznia a szemében, legalább 5 perces időközzel használja a különböző készítményeket! A GenTeal-t alkalmazza utoljára!

A készítmény alkalmazását követően zárja vissza a cseppentőtartályt!

8°C és 25°C közötti hőmérsékleten tárolandó. 

A cseppentőtartály cseppentőjének csúcsát soha ne érintse hozzá semmilyen felülethez, így a szeméhez sem, mivel ez a termék szennyeződését eredményezheti!

A fertőzések átvitelének elkerülése érdekében több ember ne használjon közösen azonos cseppentőtartályt!

### 7 Figyelmeztetés

Gyermekektől elzárva tartandó.



Ha tartós szemfájdalmat vagy irritációt tapasztal, ne használja tovább a készítményt és forduljon szemorvosához!

### 8 Mellékhatások

A GenTeal szemcsepp nagyon jól tolerálható. Beszámoltak az alkalmazást követően jelentkező átmeneti homályos látásról.

Ritkán beszámoltak az alkalmazást követően fellépő égő vagy csípő érzésről, allergiás reakcióról és a szem vörösödéséről. Ha e tünetek bármelyikét észleli, ne használja tovább a készítményt és forduljon szemorvosához!

### 9 Csomagolási egység

10 ml

A háztartási hulladékkal együtt kidobható, az országos rendelkezésekkel összhangban.



0459

Laboratoires THEA

12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Franciaország

### 10 Felhasználhatósági időtartam

Felbontás nélkül: 24 hónap, 8°C - 25°C hőmérsékleten.

Felbontást követően: 12 hét, 8°C - 25°C hőmérsékleten.

### 11 Segédanyagok felsorolása

Hipromellóz

Nátrium-perborát tetrahidrát

Nátrium-klorid

Bórsav

Kálium-klorid

Foszfonsav (Dequest 2060S)

Sósav

Injekcióhoz való víz

A beteg tájékoztató elkészítésének dátuma 2012. március